

# 4 žingsniai

## Kaip naudoti adrenalino automatinį injektorių?

1.



Paimkite adrenalino automatinį injektorių į pagrindinę ranką taip, kad nykštys būtų arčiausiai mėlyno apsauginio dangtelio.


Kita ranka traukdami tiesiai aukštyn nuimkite mėlyną apsauginį dangtelį.

2.



Laikykite adrenalino automatinį injektorių 10 cm atstumu nuo išorinės šlaunies dalies. Oranžinis antgalis turi būti nukreiptas į išorinę šlaunies dalį.

3.

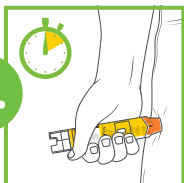

Tvirtai smeikite adrenalino automatinį injektorių į išorinę šlaunies dalį taip, kad injektorius su šlaunimi sudarytų tinkamą kampą (90°).

**Šioje vietoje tvirtai laikykite injektorių 3 sekundes.**

4.



Dabar **injekcija yra pabaigta**, o automatinio injektoriaus indikatoriaus langelis tamsus. Ištraukite automatinį injektorių (oranžinis adatos dangtelis pailgės tam, kad būtų uždengta adata) ir jį saugiai išmeskite.

Švelniai pamasažuokite injekcijos vietą apie 10 sekundžių.

Draudžiama nuimti mėlyną apsauginį dangtelį, kol automatinis injektorius nėra paruoštas naudojimui.

### Adrenalino automatinio injektoriaus laikymo sąlygos.

- Adrenalino automatinių injektorių laikykite ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje, nešaldykite ir neužšaldykite.
- Laikykite švirkštiklį išorinėje dėžutėje, kad apsaugotumėte nuo šviesos. Veikiamas oro arba šviesos, adrenalinas greitai suyra ir tirpalas tampa rausvu arba ruda.
- Prisiminkite, jog kartais reikia patikrinti automatinio injektoriaus indikatoriaus langelį ir įsitikinti, jog tirpalas jame tebėra skaidrus ir bespalvis.
- Jei pasikeistų tirpalo spalva arba atsirastų nuosėdų, pakeiskite automatinį injektorių kitu, net jei jo galiojimo data tinkama.